



Instrucciones de uso

Gracias por elegir Elvie: estamos encantadas de darte la bienvenida. Nuestra misión es crear productos que mejoren la vida de las mujeres, así que esperamos que Elvie Catch marque la diferencia en la tuya.

Cuidado de Elvie Catch

Desmonta Elvie Catch antes de limpiarlo o esterilizarlo.

Esterilización (antes del primer uso y, posteriormente, una vez al día):

Esteriliza las piezas en agua hirviendo durante cinco minutos.


○ Apto para métodos de esterilización por microondas, vapor o agua fría.

Limpieza (después de cada uso):

Lava las piezas con agua limpia y jabón. Aclara con abundante agua.

○ Colócalo en la rejilla superior del lavavajillas.

Elvie Catch debería almacenarse limpio, seco y completamente montado.

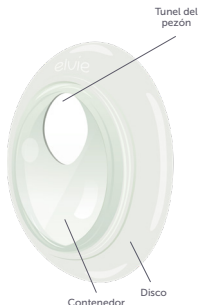

Uso de Elvie Catch

1. Presiona la Contenedor en la ranura del Disco. Asegúrate de que esté presionada por completo
2. Coloca la copa de recolección en de forma que esté fijada de forma segura. Para mayor comodidad y ajuste, recomendamos llevar Elvie Catch con un sujetador de lactancia
3. Centra el pezón en el Túnel del pezón
4. Asegúrate de comprobar el nivel de leche con regularidad para ase gurarte de que no rebese. No permitas que el nivel de leche sobrepase la parte inferior del Túnel del pezón
5. Te recomendamos que te quites Elvie Catch cada 2-3 horas para permitir que el pezón se seque por completo. Al quitártelo, podría ayudarte inclinarte ligeramente hacia delante
6. Elvie Catch no está diseñado para almacenar leche. Vierte leche a través de la parte superior del Túnel del pezón tal y como se muestra en la ilustración



Nota: Tu bebé no debe tomar leche que se haya extraído durante largos periodos de tiempo y que haya permanecido durante demasiado tiempo a temperatura ambiente.

Seguridad y Garantía

Uso previsto:

"Elvie Catch" está diseñado para que las mujeres lactantes recojan las fugas de leche durante la lactancia y entre sesión y sesión, cuando sin querer puede fluir un poco de leche.

Materiales:

Disco: Silicona, Contenedor: Polipropileno*

Seguridad y Garantía:

- Inspecciona si hay daños antes del primer uso y después de cada uso
- No almacenes las piezas húmedas o mojadas, ya que puede producirse moho
- No dejes caer ni introduzcas ningún objeto extraño en ninguna de las aberturas del dispositivo
- Si el paquete parece que está dañado o que se ha manipulado antes del uso, no lo utilices y ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente
- Mantén Elvie Catch alejado del calor excesivo y las llamas abiertas
- No laves Elvie Catch más de 3 horas
- Utiliza Elvie Catch únicamente para el uso previsto que se describe en este manual

Garantía

Elvie Catch está respaldado por una garantía limitada del fabricante frente a cualquier defecto del material o de la fabricación, siempre y cuando se use de acuerdo con las instrucciones del producto durante 90 días a partir de la fecha de compra ("Período de garantía"). Esta garantía se proporciona de forma gratuita y es independiente de cualquier derecho previsto en las leyes o reglamentos de consumo del país de adquisición. No excluye, limita ni afecta a los derechos del consumidor o a las reclamaciones legales derivadas de las leyes nacionales sobre la venta de productos de consumo. Esta garantía se rige y se construye según las leyes en las que la adquisición del producto tuvo lugar. Esta garantía no cubre el deterioro estético causado por el paso del tiempo ni los daños causados por el desgaste común, destrucción física o natural, accidentes, uso indebido, modificaciones, negligencia o cualquier otra causa externa. Es un producto de una sola usuaria. El uso por parte de más de una persona puede presentar un riesgo para la salud e invalida la garantía. La garantía no cubre las adquisiciones realizadas a revendedores no autorizados. Las reclamaciones de garantía han de estar justificadas con pruebas razonables, incluyendo un documento acreditativo de la fecha de compra junto con las condiciones de esta garantía. Si tienes algún problema o identificas algún defecto en tu Elvie Catch dentro del período de garantía, házselo saber a Chiaro Technology Limited ("Chiaro") en questions@elvie.com. Chiaro se reserva el derecho a investigar la causa del defecto y puede ejercer su discreción para decidir si debe o no sustituir el producto o alguna pieza de manera gratuita. En el caso de que Chiaro decida proporcionar un reemplazo, cualquier reemplazo no extenderá la duración de esta garantía.

La única responsabilidad de Chiaro por cualquier incumplimiento de esta garantía limitada se limita a la sustitución de cualquier producto que no cumpla con la anterior garantía. Guarda el justificante de compra en caso de que necesites ponerle en contacto con atención al cliente de Elvie por motivos de la garantía.

Labels



Seguridad alimentaria



Símbolo de reciclaje



Consulta las instrucciones de uso



Fabricante



Fecha de fabricación:



Número de lote
