



Instructions d'utilisation

Merci d'avoir choisi Elvie: nous sommes ravis que vous soyez là.
C'est notre mission de créer des produits qui améliorent
la vie des femmes. Nous espérons donc qu'Elvie Catch
fasse la différence dans la vôtre.

Prendre soin d'Elvie Catch

Démontez Elvie Catch avant de la nettoyer ou de la stériliser.

Stérilisation (avant la première utilisation puis une fois par jour):

Stérilisez les parties dans de l'eau bouillante pendant cinq minutes.

OU Adaptée aux méthodes de stérilisation par micro-onde, vapeur ou eau froide.

Nettoyage (après chaque utilisation):

Nettoyez les parties avec de l'eau propre et savonneuse.


Rincez soigneusement.

OU Mettez-les sur le panier supérieur du lave-vaisselle.

Elvie Catch devrait être rangée propre, sèche et entièrement assemblée.

Utiliser Elvie Catch

1. Enfoncez le Gobelet dans la rainure de la Colletterte.
Assurez-vous qu'il est enfoncé tout autour
2. Placez votre gobelet de collecte dans votre soutien-gorge, afin qu'il soit fermement maintenu en place. Nous recommandons de porter Elvie Catch avec un soutien-gorge d'allaitement pour un confort et un ajustement optimaux
3. Centrez votre mamelon dans le Trou pour mamelon
4. Faites en sorte de vérifier votre niveau de lait régulièrement afin de vous assurer qu'il ne déborde pas. Ne laissez pas le niveau de lait dépasser le bas du Trou pour mamelon
5. Nous vous recommandons de retirer votre Elvie Catch toutes les 2-3 heures, pour permettre au mamelon de complètement sécher à l'air.
Lors du retrait, il peut s'avérer utile de se pencher légèrement en avant
6. Elvie Catch n'est pas conçue pour stocker du lait. Versez le lait à travers le haut du trou pour mamelon comme indiqué dans l'illustration

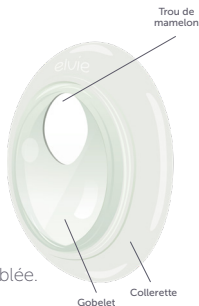

Remarque: Vous ne devriez pas nourrir votre bébé avec du lait collecté au cours de périodes de temps plus longues et laissé à température ambiante pendant trop longtemps.

Sécurité et Garantie

Utilisation prévue:

"Elvie Catch" doit être utilisée par les mères allaitantes pour collecter les fuites de lait durant et entre les sessions d'allaitement, lorsque du lait coule du sein de manière intempestive

Équipements:

Collerette: Silicone, Gobelet: Polypropylène

Sécurité et avertissements

- Vérifiez s'il y a des dommages avant la première utilisation et après chaque utilisation
- Ne rangez pas de parties mouillées ou humides, car de la moisissure peut se développer
- Ne faites pas tomber et n'insérez pas de corps étranger dans les ouvertures de l'appareil
- Si le colis semble endommagé ou altéré avant l'utilisation, ne l'utilisez pas et contactez notre équipe du service client
- Conservez Elvie Catch à l'abri de toute chaleur excessive ou de toute flamme nue
- Ne portez pas Elvie Catch pendant plus de 3 heures
- N'utilisez Elvie Catch que pour l'utilisation prévue telle que décrite dans ce manuel

Garantie

Elvie Catch est couverte par une garantie volontaire et limitée du fabricant contre tout défaut d'équipement et/ou de fabrication, lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions de produit : pendant 90 jours à compter de la date d'achat d'origine ('Période de garantie'). Cette garantie est fournie gratuitement et est distincte de tous droits fournis en vertu des lois et règlement de protection du consommateur dans le pays d'achat. Elle n'exclut, ne limite ou n'affecte pas les droits des consommateurs ou les revendications juridiques résultant des lois nationales sur la vente de produits de consommation. Cette garantie est régie et interprétée en vertu des lois de la juridiction dans laquelle l'achat du produit a eu lieu. Cette garantie ne couvre pas les détériorations cosmétiques, les dommages causés par l'usure générale, les destructions physiques ou naturelles, les accidents, les mauvais usages, les modifications, les négligences ou autres causes externes. Ceci est un produit à utilisateur unique. L'utilisation par plus d'une personne peut présenter un risque sanitaire et annule la garantie. La garantie ne couvre pas les achats auprès de revendeurs non autorisés. Toute demande au titre de la garantie doit être appuyée par des preuves suffisantes, y compris la preuve de la date d'achat ainsi que ces conditions de garantie. Si vous avez un problème ou si vous identifiez toute défaillance de votre Elvie Catch durant la Période de garantie, veuillez notifier Chiaro Technology Limited ('Chiaro') à l'adresse questions@elvie.com. Chiaro se réserve le droit d'enquêter la cause de la défaillance et peut exercer sa discrétion pour déterminer si oui ou non il faut remplacer le Produit ou toute partie en question gratuitement. Si Chiaro décide de fournir un remplacement, tout remplacement ne prolongera pas la durée de cette garantie.

La seule responsabilité de Chiaro à l'égard de toute violation de cette garantie limitée est limitée au remplacement de tout produit ne respectant pas la garantie qui précède. Veuillez conserver votre preuve d'achat au cas où vous auriez besoin de contacter le service client d'Elvie pour des services de garantie.

Labels



Sécurité alimentaire



Symbole de recyclage



Consultez les instructions d'utilisation



Fabricant



Date de fabrication



Numéro de lot
