



Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank dat je voor Elvie hebt gekozen – we zijn er blij mee. Het is onze missie om producten te maken die het leven van vrouwen beter maken en dus hopen we dat de Elvie Catch ook op jouw leven een positieve invloed heeft.

Onderhoud van de Elvie Catch

Demonteer de Elvie Catch voor je hem reinigt of steriliseert.

Sterilisatie (voor het eerste gebruik en daarna een keer per dag):

Steriliseer de onderdelen vijf minuten in kokend water.


OF Geschikt voor sterilisatie in de magnetron, met stoom of met koud water.

Reiniging (na elk gebruik):

Was de Elvie Curve uit in een schoon zeepsopje en spoel hem vervolgens goed af.

OF Zet hem op het bovenste rek van de vaatwasser.

De Elvie Catch moet schoon, droog en volledig gemonteerd worden opgeborgen.

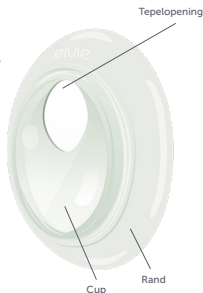

Gebruik van de Elvie Catch

1. Duw de Cup in de groef van de Rand.
Zorg ervoor dat de cup rondom goed is vastgedrukt
2. Plaats de verzamelcup zo in je bh dat hij stevig op zijn plaats blijft zitten. Gebruik de Elvie Catch met een voedingsbh zodat hij goed past en comfortabel zit
3. Zorg dat je de tepel midden in de Tepelopening plaatst
4. Controleer regelmatig het melkniveau om er zeker van te zijn dat de Cup niet overloopt. De melk mag niet hoger staan dan de onderkant van de Tepelopening
5. Wij adviseren je de Elvie Catch elke 2-3 uur te verwijderen om de tepel goed aan de lucht te laten drogen. Bij het verwijderen, kan het helpen om wat naar voren te buigen
6. De Elvie Catch is niet bedoeld om melk in te bewaren.
Giet de melk door de bovenkant van de Tepelopening. Zie afbeelding



Let op: De melk die gedurende een langere periode is verzameld en op kamertemperatuur is bewaard, mag niet meer worden gebruikt om je baby te voeden.

Veiligheid en Garantie

Bedoeld gebruik:

De 'Elvie Catch' is bedoeld voor vrouwen die borstvoeding geven en om onbedoeld weglekkende melk tijdens en tussen de voedingen op te vangen.

Materials:

Rand: Siliconen, Cup: Polypropyleen

Veiligheid en waarschuwingen:

- Controleer voor het eerste en na elk volgende gebruik op gebreken
- Geen natte of vochtige onderdelen opbergen om schimmelvorming te voorkomen
- Geen vreemde voorwerpen in de openingen van het apparaat steken of laten vallen
- Gebruik het apparaat niet als de verpakking beschadigd is of als ze al een keer is geopend. Neem contact op met ons team van de klantenservice
- Houd de Elvie Catch uit de buurt van hittebronnen en open vuur
- Draag de Elvie Catch niet langer dan 3 uur
- Gebruik de Elvie Catch uitsluitend voor het doel dat in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven

Garantie

De Elvie Catch valt onder een vrijwillige, beperkte garantie voor gebreken in de materialen en/of verwerking, als het toestel wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen van het product: 90 dagen vanaf de oorspronkelijke aankoop ('Garantieperiode'). Deze garantie is gratis en staat los van rechten die voortkomen uit consumentenwetgeving of regelgeving van het land waar het apparaat is gekocht. Dit laat consumentenrechten of claims onder nationale wetten met betrekking tot de verkoop van consumenten goederen onverlet en beperkt of beïnvloedt deze niet. Deze garantie is onderworpen aan en opgesteld volgens de wetten waaronder de aankoop van dit product heeft plaatsgevonden. Deze garantie geldt niet voor uiterlijke slijtage, schade die is ontstaan door algemeen gebruik, fysieke of natuurlijke vernietiging, ongevallen, verkeerd gebruik, modificaties, verwaarlozing of andere externe oorzaken. Dit is een product dat bedoeld is voor persoonlijk gebruik door één persoon. Wordt het door meer dan een persoon gebruikt, kan het een gezondheidsrisico vormen en deze garantie vervalt. De garantie dekt geen aankopen van niet-geautoriseerde wederverkopers. Alle garantieclaims moeten worden ondersteund door redelijke bewijzen, waaronder een aankoopbewijs voorzien van datum samen met deze garantievoorwaarden. Als u binnen de garantieperiode problemen heeft met uw Elvie Catch of defecten vaststelt, neem dan contact op met Chiaro Technology Limited ('Chiaro') via questions@elvie.com. Chiaro behoudt zich het recht voor de oorzaak van het defect te onderzoeken en het product al dan niet te vervangen of relevante onderdelen gratis te vervangen. In het geval dat Chiaro besluit om een vervangend product te leveren, heeft dat geen invloed op de duur van de bestaande garantie.

De enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Chiaro voor een inbreuk op deze beperkte garantie blijft beperkt tot het vervangen van een product dat niet voldoet aan de hierboven beschreven garantiebepalingen. Bewaar uw aankoopbewijs voor het geval dat u contact moet opnemen met de Elvie klantenservice vanwege de garantie.

Labels



Voedselveiligheid



Recycling symbool



Lees de gebruiksaanwijzing



Producent



Productiedatum



Chargennummer
