

elvie  
catch

## 使用说明

感谢您选择 Elvie。

我们的使命是创造能够改善女性生活的产品，  
所以我们希望Elvie Curve能为您们的生活带来改善。

## Elvie Catch 的维护

清洁或消毒之前请先拆卸Elvie Catch。

消毒（请在第一次使用前消毒并每天消毒一次）：  
在沸水中消毒 5 分钟。


或者 适用于微波、蒸汽或冷水等消毒方法。

清洗（每次使用后）：

先用干净的肥皂水清洗零部件，再彻底冲洗干净。

或者 将本产品放于洗碗机顶层架子上。

Elvie Catch 应完全组装好后存放，并确保清洁和干燥。

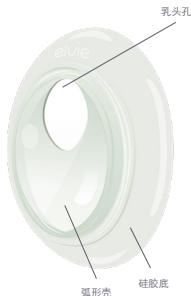

## Elvie Catch 的使用方法

1. 将弧形壳推入硅胶底的凹槽中。确保将其完全推入到位
2. 把Elvie Catch放入胸罩，牢牢地固定就位。  
为了获得最佳的舒适度和贴合性，我们建议您使用  
Elvie Catch 的时候佩戴哺乳文胸
3. 让乳头位于乳头孔的中心位置
4. 一定要定期检查乳汁的量，确保不会溢出。  
不要让乳汁超过乳头孔的底部
5. 我们建议您每 2-3 小时拆下 Elvie Catch，  
让乳头完全干燥。身体稍微前倾有助于拆下
6. Elvie Catch 不能用来储存乳汁。如图所示，  
通过乳头孔的顶部倒出乳汁



**请注意：**收集时间过长或在室温下放置太久的乳汁不应喂给您的宝宝。

# 安全与警示

## 用途：

'Elvie Catch' 用于哺乳期妇女在哺乳期间和哺乳间隔，收集乳房自动分泌的乳汁。

## 材料：

硅胶底：硅树脂

弧形壳：聚丙烯

## 安全与警示：

- 首次使用前和每次使用后检查是否有损坏
- 不得存放潮湿或有湿气的零件，以免发霉
- 不得将任何异物放入或插入本产品的任何开口中
- 如果在使用前发现包装受损或被改装，请勿使用，并请联系我们的客户服务团队
- Elvie Catch 应远离高温和明火
- 佩戴 Elvie Catch 不得超过三小时
- 仅可将 Elvie Catch 用于本说明书所述的预期用途

## 保修

按照产品使用说明的情况下，Elvie Catch 针对材料和/或工艺缺陷，自愿提供有限的厂家保修：自原购买日起90天（“保修期”）。本保修为免费提供，独立于购买产品所在国家的消费者法律或者法规所规定的任何权利。它不排除、限制或影响任何消费者权利或因产品销售的国家法律而产生的法律要求。本保修受产品购买发生地的法律管辖并根据该法律解释。

本保修不包括外观退化、一般磨损、物理或自然损坏、意外事故、误用、改装、疏忽或其他外部原因造成的损坏。本产品为单用户产品。多人使用可能会造成健康风险，并使保修失效。保修不包括从非授权经销商购买的情况。任何保修索赔均须有合理的证据支持，包括购买日期的证明以及上述保修条件。

如果您在保修期内遇到问题或发现 Elvie Catch 有任何缺陷，请通过以下电子邮件告知 Chiaro Technology Limited ('Chiaro')：questions@elvie.com。Chiaro 有权调查缺陷原因，并可自行决定是否免费更换产品或任何相关部件。如果 Chiaro 决定提供更换部件，任何更换部件均不会延长本保修期。

对于任何违反本有限保修条款的产品，Chiaro 所需承担的唯一责任和义务仅限于对相关产品进行一次更换。请保留您的购买证明，以便您联系 Elvie 客户服务提供保修。

## Labels



食品安全

---



回收标志

---



请参阅使用说明

---



制造商

---



制造日期

---



批号

---



