

elvie
catch

使用說明

謝謝您選擇Elvie。

我們的使命是打造能改善女性生活的產品，
希望Elvie Curve能給您的生活帶來改善。

保養Elvie Catch

請在清潔和消毒之前拆卸Elvie Catch。

消毒（請在第一次使用前消毒並每天消毒一次）：
在沸水中消毒5分鐘。

或者 適用於微波、蒸汽或冷水等消毒方法。

清潔（每次使用之後）：


請使用乾淨的皂液清洗零部件，然後徹底沖洗。

或者 請將本設備放置在洗碗機的上層碗架。

Elvie Catch應當完整組裝，在潔淨且乾燥的地方儲存。

Elvie Catch使用方法

1. 將弧形殼推入矽膠底的凹槽中。確保將其完全推入到位
2. 把Elvie Catch放入胸罩，牢牢地固定就位。
為了獲得最佳的舒適度和貼合性，
我們建議您使用 Elvie Catch 的時候佩戴哺乳文胸
3. 讓乳頭位於乳頭孔的中心位置
4. 一定要定期檢查乳汁的量，確保不會溢出。
不要讓乳汁超過乳頭孔的底部
5. 我們建議您每 2-3 小時拆下 Elvie Catch，
讓乳頭完全乾燥。身體稍微前傾有助於拆下
6. 不能用來儲存乳汁。如圖所示，通過乳頭孔的頂部倒出乳汁

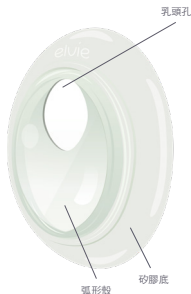

請注意：如果乳汁收集時間過長或者在室溫環境存放時間過長，則不宜餵給您的寶寶。

安全與警示

用途：

‘Elvie Catch’用於哺乳期婦女在哺乳期間和哺乳間隔，收集乳房自動分泌的乳汁。

材料：

矽膠底：矽樹脂

弧形殼：聚丙烯

安全與警示

- 請在首次使用前和每次使用後檢查是否有損壞
- 請勿將部件儲存在潮濕環境，以免發霉
- 請勿將任何異物放入或者插入本設備的任何開口處
- 如果在使用前發現包裝損壞或已被改裝，請勿使用並聯繫我們的客戶服務團隊
- 請將Elvie Catch遠離過熱的熱源和明火
- 請勿佩戴Elvie Catch超過3小時
- 請將Elvie Catch 僅用於本手冊所述的預期用途

保固資訊

按照產品使用說明的情況下，Elvie Catch針對材料和/或工藝缺陷，自願提供有限的廠家保固：自原購買日起90天（“保固期”）。本保固為免費提供，獨立於購買產品所在國家的消費者法律或者法規所規定的任何權利。它不排除、限制或影響任何由產品銷售國家法律所帶來的消費者權益或法律索賠。本保固受到產品購買地法律的管轄，並依據當地法律制定。

本保固不適用於外觀劣化、一般使用磨損、物理或自然破壞、意外、誤用、修改、疏忽或其他外部原因造成的損壞。本產品為單人使用。多人使用可能會帶來健康風險，並使保固失效。本保固部包括從非授權經銷商處購買的產品。所有保固需求必須有合理的證據支持，包括購買日期的證明以及這些保固條件。

如果您在保固期間遇到或者發現您的Elvie Catch有任何瑕疵，請通知Chiaro Technology Limited（“Chiaro”）：questions@elvie.com。Chiaro保留調查瑕疵原因的權利，並可酌情決定是否免費更換產品或任何相關部件。如果Chiaro決定提供產品更換，任何更換都不會延長保固期限。Chiaro對於任何違反本保固條款的責任和義務僅限於更換任何不符合上述保固的產品。”

對於任何違反本有限保固條款的產品，Chiaro所需承擔的唯一責任和義務僅限於對相關產品進行一次更換。請保留您的購買憑證，以備您需要聯繫Elvie客戶服務部門使用保固服務

Labels



食品安全



回收標誌



參考使用說明



製造商



製造日期



批號
