



Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto Elvie. Siamo super felici di averti come cliente.

La nostra missione consiste nel realizzare prodotti in grado di migliorare la vita delle donne, per cui ci auguriamo di aver migliorato anche la tua vita con Elvie Curve.

Cura e manutenzione di Elvie Curve

Smonta Elvie Curve prima di pulirlo o sterilizzarlo.

Sterilizzazione (prima del primo utilizzo, dopodiché una volta al giorno):

Sterilizza i componenti in acqua bollente per cinque minuti.

🟢 Adatto ai metodi di sterilizzazione a microonde, con vapore o con acqua fredda.

Pulizia (dopo ogni uso):

Lava le parti con acqua pulita saponata. Risciacqua con cura.




🟢 Collocalo sul cestello in alto della lavastoviglie.

Elvie Curve deve essere conservato pulito, asciutto e interamente assemblato.

Come usare Elvie Curve

Come avviare una sessione:

1. Inserisci la sacca nella struttura
2. Posiziona il capezzolo al centro dell'apposito foro, in modo che sia comodo e che non prema contro la parte interna della sacca
3. Premi la sacca per avviare l'aspirazione. Se l'aspirazione generata è fastidiosa, premi delicatamente la valvola per aprirla e rilasciare la pressione
4. Controlla che il tuo capezzolo sia ancora allineato al centro
5. Posiziona e tira il reggiseno da allattamento sopra a Elvie Curve. Tienilo ben premuto contro il seno, senza che vi siano spazi vuoti
6. Se percepisci un calo dell'aspirazione, premi nuovamente la sacca per mantenere l'aspirazione e assicurarti che il latte continui a fluire. Puoi farlo tranquillamente attraverso il tuo reggiseno. Potrebbe essere necessario ripetere questo passaggio ogni paio di minuti, ma imparerai qual è il modo più adatto a te
7. Tieni d'occhio il livello del latte per accertarti che il tiralatte non venga riempito in eccesso

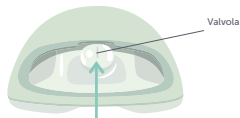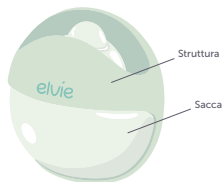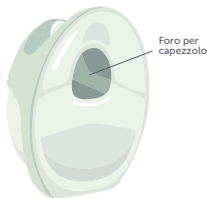

Come terminare la sessione:

1. Premi la valvola per aprirla e rilasciare la pressione e rompi il sigillo intorno al capezzolo con il dito
2. Posiziona Elvie Curve in posizione distesa con la parte frontale rivolta verso il basso finché non sei pronta per versare il tuo latte in un contenitore
3. Elvie Curve non è concepito per conservare il latte. Fai uscire il latte attraverso il foro del capezzolo come illustrato sotto per svuotare il latte dalla sacca e dalla valvola

Nota: Il latte raccolto in periodi di tempo prolungati e conservato a temperatura ambiente per un periodo eccessivo non deve essere usato per allattare il proprio bebè.

Sicurezza e Garanzia

Uso previsto:

"Elvie Curve" è un tiralatte che funziona senza alimentazione elettrica ed è impiegato dalle donne in allattamento per tirare e raccogliere il latte dal proprio seno.
"Elvie Curve" è destinato a una singola utilizzatrice.

Materiali:

Sacca: silicone, Struttura: polipropilene

Sicurezza e avvertenze

- Controllare il dispositivo prima del primo utilizzo e dopo ogni uso per accertarsi dell'assenza di danni
- Non conservare i componenti bagnati o su cui è presente vapore. In caso contrario, potrebbe formarsi della muffa
- Non far cadere né inserire oggetti estranei nelle aperture del dispositivo
- Se la confezione è visibilmente danneggiata o manomessa prima dell'uso, non usare il tiralatte e contattare l'assistenza clienti



- Tenere Elvie Curve lontano dalle fonti di calore e non esporlo alle fiamme libere o al calore eccessivo
- Elvie Curve non deve essere impiegato in posizione sdraiata né durante gli esercizi fisici faticosi o le attività che costituiscono pericolo di lesioni
- Non indossare Elvie Curve quando non si tira attivamente il latte con il prodotto
- Non usare Elvie Curve alla guida di veicoli o durante l'uso di macchinari pesanti
- Non tirare il latte prima del parto, in quanto il tiraggio del latte potrebbe indurre il travaglio
- Usare Elvie Curve solo per l'uso previsto conformemente a quanto indicato nel presente manuale

Garanzia

Elvie Curve è coperto da una garanzia volontaria limitata del produttore contro eventuali difetti di materiale e/o di lavorazione, se utilizzato in conformità alle istruzioni del prodotto: per 90 giorni dalla data di acquisto originale ("Periodo di garanzia"). Questa garanzia è fornita gratuitamente ed è separata da qualsiasi diritto previsto dalle leggi o dai regolamenti del Paese di acquisto. Essa non esclude, limita o pregiudica i diritti dei consumatori o i diritti legali derivanti dalle leggi nazionali sulla vendita di prodotti di consumo. La presente garanzia è disciplinata e costruita in base alle leggi in cui è avvenuto l'acquisto del prodotto. Questa garanzia non copre il deterioramento estetico, i danni causati da usura generale, distruzione fisica o naturale, incidenti, uso improprio, modifiche, negligenza o altre cause esterne. Questo è un prodotto monouso. L'uso da parte di più di una persona può presentare un rischio per la salute e annulla la garanzia. La garanzia non copre gli acquisti da rivenditori non autorizzati. Qualsiasi richiesta di garanzia deve essere supportata da prove ragionevoli, inclusa la prova della data di acquisto, oltre alle presenti condizioni di garanzia. Se si riscontra un problema o si individuano difetti con Elvie Curve entro il periodo di garanzia, si prega di informare Chiaro Technology Limited ("Chiaro") all'indirizzo e-mail questions@elvie.com. Chiaro si riserva il diritto di indagare la causa del difetto e può esercitare la propria discrezione nel determinare se sostituire o meno il prodotto o qualsiasi parte rilevante gratuitamente. Nel caso in cui Chiaro decida di offrire una sostituzione, qualsiasi sostituzione non prolungherà la durata della presente garanzia.

L'unica responsabilità di Chiaro per qualsiasi violazione di questa garanzia limitata si applica esclusivamente alla sostituzione di qualsiasi prodotto non conforme alla garanzia precedente.

Si prega di conservare la prova d'acquisto nel caso in cui sia necessario contattare il servizio clienti Elvie per i servizi di garanzia.

Labels



Adatto al contatto con alimenti



Icona del riciclaggio



Consultare le istruzioni per l'uso



Produttore



Data di produzione



Numero di lotto

Manufactured and Distributed by Chiaro Technology Limited

Model number: EC01

Document number: EL-S-0014-01

